



# OS SETE PASSOS DA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DO SALÃO DE BELEZA

## ETAPA 1

**Inicie o processo de limpeza dos alicates, espátulas e pinças utilizando luvas grossas de proteção para as mãos.**

- Lave o material com bastante água para retirar o resíduo de cutícula;
- Deixe de molho em detergente (como orientação do fabricante) em caixa plástica;
- Escove o material com escova de plástico de cerda macia e cabo longo;
- Enxague bem todo o material em água corrente.

## ETAPA 2

**Seque tudo com papel toalha.**

## ETAPA 3

**Embale o material em kits de atendimento para cada cliente em papel grau cirúrgico auto selante ou com uso de seladora e sempre utilize embalagem grau cirúrgico uma única vez.**

## ETAPA 4

**Coloque a data do dia do processamento na aba do envelope.**

## ETAPA 5

**Distribua os kits na autoclave sem ultrapassar o limite recomendado pelo fabricante do equipamento.**

## ETAPA 6

**Guarde os kits em gavetas ou caixas plásticas identificadas como material já esterilizado.**

## ETAPA 7

**Validação da Esterilização (garantia da esterilização correta)**

- Utilize o indicador químico em uma embalagem diariamente no primeiro ciclo do dia. Este resultado deve ser registrado diariamente em impresso próprio.
- Utilize o indicador biológico em uma embalagem a cada 30 dias. Este resultado deve ser registrado mensalmente no impresso próprio.

## FIQUE ATENTO!

- **Lembre-se de lavar as mãos antes e após o atendimento de cada cliente.**
- Atenção ao manusear os materiais, pois os mesmos podem ferir.
- **Não proteja as pontas dos alicates com algodão, papel alumínio ou plástico, pois isso interfere na esterilização.**
- Não use detergente doméstico para lavagem do instrumental: ele pode danificar o seu instrumental.
- **Utilize uma pia exclusiva para a higienização das mãos e outra pia para lavagem dos materiais.**
- Observe as recomendações do fabricante sobre o detergente enzimático ou neutro, pois existem produtos que precisam ser diluídos.
- **Reserve um espaço de apoio (mesa ou bancada) perto da pia e da autoclave, para a preparação dos kits de atendimento.**
- Não coloque kits em excesso na autoclave, pois isso impede a circulação do vapor.
- **Não reaproveite embalagem esterilizada que, após o uso, deve ser descartada no lixo comum.**
- Guarde os kits esterilizados em gavetas ou caixas plásticas organizadas e limpas, sem presença de sujeiras.
- **Cuide para que os kits não amassem ou rasguem pois podem perder a validade da esterilização.**
- Materiais não esterilizáveis (escovas, pentes, cabos) devem ser higienizados à cada cliente.
- **Converse com todos os profissionais de sua equipe sobre os passos do processo de esterilização.**

## **A SUBVISA realiza palestras sobre esterilização destes materiais.**

Faça a inscrição da sua equipe  
através do e-mail **geducavisa@gmail.com**



### **Siga nossas redes:**

- 📘 [facebook.com/PrefeituradoRio](https://facebook.com/PrefeituradoRio)
- 📺 [youtube.com/PrefeituraRio](https://youtube.com/PrefeituraRio)

### **Canais da Vigilância Sanitária:**

- 🏠 [prefeitura.rio/vigilanciasanitaria](https://prefeitura.rio/vigilanciasanitaria)
- 📍 [/vigilanciasanitariario](https://vigilanciasanitariario) 📍 [/vigilanciasanitariario](https://vigilanciasanitariario)
- 📧 [@visa\\_rio](mailto:@visa_rio) 📧 [@visa\\_rio](mailto:@visa_rio)